

**Azure Endosseous Dental Implant
Accessories (Non-sterile)**

Azure 牙齒骨內植入物附件(未滅菌)

※使用前請務必詳閱使用說明書並遵照
指示使用

衛署醫器製壹字第004106號

產品說明：

Azure牙齒骨內植入物附件由植牙印模零件及相關修復過程需求配件所組成。適用Azure天璽或Azure優理克植體系統產品進行植體支撐假牙修復過程中，用於印模製作齒冠之用。產品採用鈦合金(Ti64Al4V)、不銹鋼、POM、PA11、PSU等材料製成。

用途與效能

用於人工植牙修復流程轉印模之零件，藉以輔助製作人工假牙。

適應症

本附件為牙科植體修復手術中所使用的附屬零件。牙醫師及牙技師使用本附件產品自病患口中進行植牙相對位置資訊取得，並於過程中製作口腔模確認種植體之正確位置與咬合必須資訊，以便取模後於牙技師所製作正確之齒冠。使用者應為具備熟悉本公司植體產品手術流程之牙醫師及牙技師。

注意事項：

包裝上註明“NON-STERILE”字樣。如需直接進入口腔進行取模作業。使用前必須用高壓蒸氣鍋，以溫度135°C至少10分鐘，並乾燥至少30分鐘以達到完全滅菌效果。

產品應用於牙技師端，待牙技師製作完假牙，交付醫師前須依牙技師所製作流程進行清潔，轉移至醫師端，預定裝置於患者口內須依標準或醫療單位規定方式進行消毒及滅菌後，再行裝置於口中




修復使用。

本系列產品任何部份，不可與其它廠牌系統零件搭配使用，以避免產生搭配不良之情況。

本產品應儲存於室內通風蔭涼處，並避免日光直接照射。

使用前若發現產品損壞或缺件，請勿使用並盡快聯絡本公司進行更換維修。

詳細產品使用方式，請詳閱本公司手術說明書，或洽本公司技術人員。

產品標示符號 Product Label Symbols	標示符號敘述 Product Label Legend
	禁止重複使用 Do not reuse
	查閱使用說明書 Consult instruction for use
	未經滅菌 Non sterile

Azure™

藥商名稱：鈺鈦科技股份有限公司 總公司

藥廠地址：40852台中市南屯區精科路9號

製造廠名稱：鈺鈦科技股份有限公司 總公司

製造廠地址：40852台中市南屯區精科路9號

TEL：+886-4-2359-5336

FAX：+886-4-3601-9772

www.intai.com.tw

www.ifubiomat3.com

VIT07-01