

Az eszköz több egységet tartalmazó kiszerezésben biztosított. A külső címke tájékoztat a sarzsszámról, amelyet fel kell jegyezni a beteg egészségügyi dokumentumaiban a termék teljes körű követhetőségének biztosítása érdekében. A gyártó a csomagoláson további címkéket tesz elérhetővé, amelyek aztán hasonló okokból az egészségügyi dokumentumokon helyezhetők el. Az így biztosított további címkék egyikét át kell adni a betegnek.

Ne használja az orvostechnikai eszközt, ha az eredeti csomagolás nyitott, sérült vagy károsodás jeleit mutatja.

11 | Tárolás

A **Titanium AccuraMesh** eszközt szobahőmérsékleten kell tárolni, és külső sérülésektől meg kell óvni.

Műtétet követő eltávolítás esetén az ártalmatlanítás során a vérrrel szennyezett eszközök ártalmatlanítására vonatkozó szabályokat kell betartani.

A biológiai szennyezőanyagokkal nem érintkező, gyártott alkatrészek ártalmatlanítása során a nyersanyagok

12 | A beteg tájékoztatása

A sebész/orvos felelősségi körébe tartozik a beteg megfelelő tájékoztatása az orvostechnikai eszköz működéséről és szükséges

kezeléséről, valamint az azzal összefüggő, ismert kockázatokról.

Gyártó

Resdevmed Lda.

Travessa do Navega, 436 C, Arada, 3885-183, Ovar, Portugália

Elérhetőségek: (351) 256782047

www.boneeasy.com

Forgalmazza:

Biomet 3i Dental Iberica, S.L.U. C/ Tirso de

Molina, 40

WTC Almeda Park - Edificio 4, planta 2 08940 Cornellá







de Llobregat Barcelona, Spanyolország

Utolsó módosítás: 2021 április 5._

1. változat Dokumentumkód: RG.PR.21.54

Tájékoztató az alkalmazott jelzésekről:

	Sarzs kód
	Felhasználhatóság
	Újrahasználni tilos
	Gyártó
	Etilén-oxiddal sterilizálva
	Gyártás dátuma
	Figyelem

	Tilos újrasztilizálni
	Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Termékkód
	Orvostechnikai eszköz
	Forgalmazó
	Tekintse át a használati útmutatót